

ThermoFlash®

Thermomètre SANS CONTACT

TECHNOLOGIE TESTÉE CLINIQUEMENT
EN CENTRE HOSPITALIER
SERVICE DES URGENCES PÉDIATRIQUES*

PRISE EN MAIN
RAPIDE
EN 2 ETAPES

PRO LX-261



MicroSecond Flash™
TECHNOLOGY

Factory certified

MED

ISO 13485

Model : PRO LX-261

By

Vm®
Visioned

MISE EN MARCHÉ DE VOTRE THERMOFLASH PRO LX-261

étape

1

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Connectez l'adaptateur secteur à la base de recharge. Avant d'utiliser le ThermoFlash PRO LX-261 pour la première fois, chargez la batterie durant 12 heures minimum. Durant la charge, l'appareil affiche la température ambiante de la pièce.

"le paramétrage automatique de l'appareil s'effectue"

étape

2

Sélectionnez le mode de prise de température (*celui-ci sera mémorisé pour les prises suivantes*). Appuyez sur la touche **BODY** pour la prise de température corporelle, ou sur la touche **SURFACE T°** pour la prise de température d'un biberon, d'un bain, d'un aliment ... Le ThermoFlash PRO LX-261 étant **pré-paramétré** pour prendre la température corporelle, il vous suffit après le chargement de la batterie de :

Visez le front de 2 à 5 cm de distance, pressez la touche de mesure du thermomètre, la température s'affiche instantanément. (*Avant toute prise de température, prenez bien soin de dégager les cheveux et la sueur du front.*)

SITE DE PRISE CONSEILLÉ
Artère temporelle droite

(située entre la racine des cheveux et le sourcil)

Afin d'obtenir un résultat fiable et stable, il est conseillé, à chaque changement d'environnement, ayant une différence de température ambiante importante, de laisser le ThermoFlash PRO LX-261 à cette température ambiante pendant ~ 15 minutes avant son utilisation.

de 2 à 5cm





FONCTIONS AVANCEES

Appuyez sur la touche « **PROG SETTING** », pendant 3 secondes, l'écran affiche **F1**, pour valider chaque changement souhaité, appuyer sur « **PROG SETTING** » plusieurs fois consécutivement jusqu'au menu **F5**, puis confirmer en appuyant une dernière fois sur « **PROG SETTING** », l'appareil s'éteint. (si l'appareil s'éteint durant l'opération, veuillez recommencer)

Menu F1

CHOIX DE L'UNITE DE TEMPERATURE

Sélectionnez '-' pour les degrés Celsius, '+' pour les degrés Fahrenheit.

Menu F2

SEUIL D'ALARME SONORE

Le seuil d'alarme sonore est défini par défaut sur 38°C. Sélectionnez '+' pour augmenter le seuil de 0,1°C, '-' pour le diminuer d'autant

Menu F3

CHOIX DU MODE DE PRISE BODY OU SURFACE TEMP

Sélectionnez '0' par la touche '-' pour obtenir le mode Body
Sélectionnez '1' par la touche '+' pour obtenir le mode Surface Temp

Menu F4

PRE-PARAMETRE USINE SUR "0.0"

Sélectionnez '+' pour augmenter l'écart de 0,1°C,
'-' pour le diminuer de 0,1°C, afin de revenir à la position "0.0"

Menu F5

AJOUT / SUPPRESSION DU BIP SONORE

pour activer ou désactiver le bip sonore et alarme



PARAMETRAGE PAR DEFAUT

Pour rétablir le paramétrage d'usine par défaut, appuyez sur la touche RESET à l'aide d'une pointe.

L'ECRAN AFFICHE LE MESSAGE LO



Ce message d'erreur s'affiche dans différents cas.

- Prise de température gênée par des cheveux, de la sueur, ...
- Prise de température gênée par un flux d'air...
- Prise de température trop rapprochée entre 2 prises.
- Distance de mesure trop importante. (Voir manuel)

PRO LX-261

ThermoFlash®

UTILISATIONS COMPLÉMENTAIRES

TOUCHES DE SÉLECTION EN DIRECTE

Le ThermoFlash PRO LX-261 est spécialement conçu pour prendre la température corporelle d'un être humain en utilisant la fonction "**BODY**".

Vous pouvez également utiliser le ThermoFlash pour mesurer la température de la surface d'un objet, d'un aliment, d'un liquide en sélectionnant la touche "**SURFACE T°**".

En sélectionnant la touche "**ROOM**", vous obtenez immédiatement la température ambiante d'une pièce.

● ● ● • TOUCHE BODY

Utilisez le mode "BODY" en appuyant sur la touche "Body".

Plage de mesure du mode BODY : 32.9° C à 45° C

Prise de température Corporelle

● ● ● • TOUCHE SURFACE T°

Utilisez le mode "SURFACE T°" en appuyant sur la touche "SURFACE T°".

Plage de mesure du mode SUFACE TEMP : 0° C à 60° C.

● ● ● • TOUCHE ROOM

Utilisez le mode "Room" en appuyant sur la touche "Room".

Plage de mesure du mode ROOM : 0° C à 60° C.

En mode Surface Temp, le ThermoFlash PRO LX-261 permet également de prendre la température du bain, du biberon ou tout autre liquide.

En mode Room, le ThermoFlash PRO LX-261 permet également de prendre la température ambiante d'une pièce.

Lorsque le ThermoFlash PRO LX-261 est posé sur sa base de recharge (branchée sur secteur), la température ambiante de la pièce est automatiquement affichée.

