



BABYDoo Cleaner®

Model
MX6One

NEW

MOUCHE BÉBÉ AVEC DIFFUSEUR AUTOMATIQUE DE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

Le nouveau mouche bébé électronique BABYDoo MX6 One avec diffuseur de sérum physiologique est la toute dernière des innovations conçue par le Laboratoire Visiomed. Doux, performant, propre et apaisant, le BABYDoo MX6 One vous assure une garantie optimale de la bonne hygiène nasale de bébé. Le mouche bébé Babydoo MX6 One permet de diffuser d'un simple geste et automatiquement une solution saline (sérum physiologique) afin de nettoyer et d'aspirer simultanément les sécrétions nasales, qui encombrant le nez de votre bébé.

Packaging



BABYDoo Cleaner®



UN MOUCHE BÉBÉ TRÈS INNOVANT À CAPSULE HYGIÉNIQUE JETABLE ET DIFFUSEUR DE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE.



CE

■ Fonctionnalités

- Capsule Hygiénique jetable
- Aspiration automatique
- 3 embouts silicones hypoallergéniques
- 3 flacons stériles 5ml pour sérum physiologique



■ Spécifications

Puissance Max.	aspiration = 50Kpa
Référence Capsules	Capsules Jetables Caps MX5 (boîte de 100 pcs)
Batterie	2 piles AA 1,5V
Conseils d'utilisation :	<ul style="list-style-type: none"> • Il est conseillé d'utiliser le Babydoo dans les cas suivants : nez qui coule, mouchage, lavage des fosses nasales, nez encombré. • Allumez le mouche bébé, puis positionnez l'embout silicone dans la narine à traiter. • Diffusez le sérum physiologique en appuyant 1 à 2 secondes sur le bouton bleu, puis relâchez, l'aspiration commence. • Laissez agir le Babydoo environ 5 à 10 secondes selon l'état d'encombrement.



100% PLUS EFFICACE

SANTÉ BIEN-ÊTRE

vim
Visiomed