

# MOUCHE BÉBÉ

Le Duo Indispensable

**BABYDoo**  
Cleaner®  
Mouche Bébé Duo

AVANTAGE  
produit



Mouche bébé  
par aspiration  
manuelle

- Aspiration manuelle (poire)  
pour les petites mucosités

**2 Gestes selon le degré  
d'encombrement nasal**



Mouche bébé par  
aspiration buccale

- Aspiration buccale pour  
un fort encombrement nasal

**2 MODES  
D'ASPIRATION :**  
Manuelle  
ou Buccale

Avantage  
Produit



### D'autres + produits forts :

- Système anti-retour des sécrétions grâce au réservoir
- Embout souple et contact doux pour ne pas irriter le nez de bébé
- Goupillon pour Nettoyage inclus
- 3 embouts souples jetables inclus

Réf :	Gencod	PCB
MX-10	3760165441250	6



**BABYDoo**  
Cleaner®  
Embouts jetables

BOITE DE 8 EMBOUTS SOUPLES

Réf :	Gencod	PCB
EMB10	3760165441267	6



INNOVATION 2011

**UNE CATEGORIE  
LEADER EN  
PHARMACIE  
91% de PDM Valeur\***

# MOUCHE BÉBÉ

AVANTAGE  
produit

Le Duo Indispensable

**BABYDoo**  
Cleaner®  
Mouche Bébé Duo

2en1

## Le Saviez-vous ?

De 0 à 6 mois un bébé respire essentiellement par le nez. Lorsque le nez de bébé est encombré par des sécrétions, sa respiration devient difficile, il dort mal, devient grognon et a même des difficultés à téter. Pour éviter toute complication, il faut procéder à un lavage régulier des fosses nasales.

## Comment moucher un bébé ?

### LE MOUCHE-BÉBÉ DUO **BABYDOO CLEANER**

permet de choisir son geste selon le degré d'encombrement nasal :



#### ASPIRATION MANUELLE :

Introduire délicatement l'embout nasal dans une narine, en maintenant bien la tête de bébé afin d'éviter un mouvement brusque. Presser la poire pour aspirer les sécrétions. Relâcher la pression afin de libérer la narine par aspiration. Par mesure d'hygiène, nettoyer l'embout nasal avant lavage de la seconde narine.



#### ASPIRATION PAR EMBOUT BUCCAL :

Placer le tube au bout de la poire. Mettre l'embout buccal dans la bouche puis l'embout nasal dans l'une des narines du bébé. Aspirer doucement les sécrétions nasales. Nettoyer l'embout nasal et changer de narine.

Si les sécrétions sont épaisses, instiller du sérum physiologique ou une solution d'eau de mer avant d'utiliser le mouche bébé pour faciliter l'aspiration.

Nettoyer le mouche-bébé après chaque utilisation.

