



Laboratoire
Visionmed



Le bon test dès le 1^{er} jour présumé des règles !

easyTest™

MODELE
HCG20V-A

TEST DE GROSSESSE

NOUVEAU

FIABILITE SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉE A PLUS DE 99%

EasyTest est un test d'autodiagnostic à usage in vitro. Il a été spécialement conçu pour une utilisation personnelle à domicile. EasyTest mesure la présence de l'hormone spécifique de la grossesse dans les urines : l'hormone gonadotrophine chorionique (ou hCG).

Fiabilité scientifiquement prouvée d'une sensibilité de 20UI/L, EasyTest est fiable à plus de 99% et vous permet de détecter la grossesse dès le premier jour de la date présumée des règles.

Packaging

Poids Brut : 31g
Box Dim. : 195 x 55 x 25mm
EAN 13 : 3760165440628


ACL : 4845220



easyTest™

TEST DE GROSSESSE

Dès le 1er jour de retard des règles

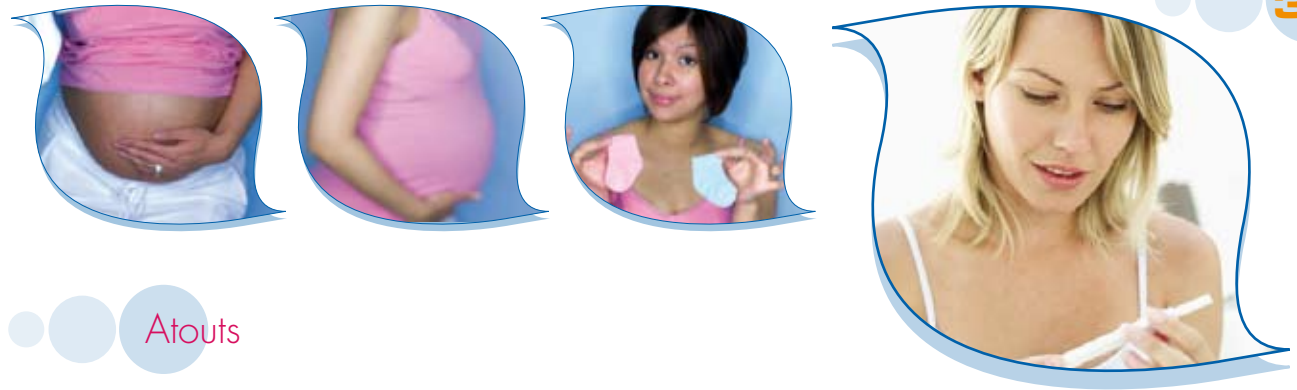

33

Atouts

- Simple D'utilisation
- Fiable à plus de 99%
- Péréemption à 30 mois
- Résultat en 3 minutes

FIABLE A PLUS DE 99%



ENCEINTE



PAS ENCEINTE

UNIQUE

Péréemption à 30 mois

SIMPLE • RAPIDE • FIABLE

- SIMPLE 1** Retirer le capuchon rose qui recouvre la mèche absorbante. Placer la mèche sous un jet d'urine pendant environ 10 à 15 secondes. (Vous pouvez également recueillir vos urines dans un récipient propre et sec).
- RAPIDE 2** La lecture du résultat se fait après 3 minutes, une ligne rose apparaît dans la fenêtre de contrôle, cela signifie que le test a bien fonctionné !
Il ne vous reste plus qu'à lire le résultat.
- FIABLE 3** Fiabilité scientifiquement prouvée. **easyTest** permet de détecter une grossesse dès le premier jour de retard des règles. Sensibilité 20 UI/l

CE
0483

Made in USA

Vim[®]
Visiomed

SANTÉ & BIEN ÊTRE