




7 fois plus de chances...

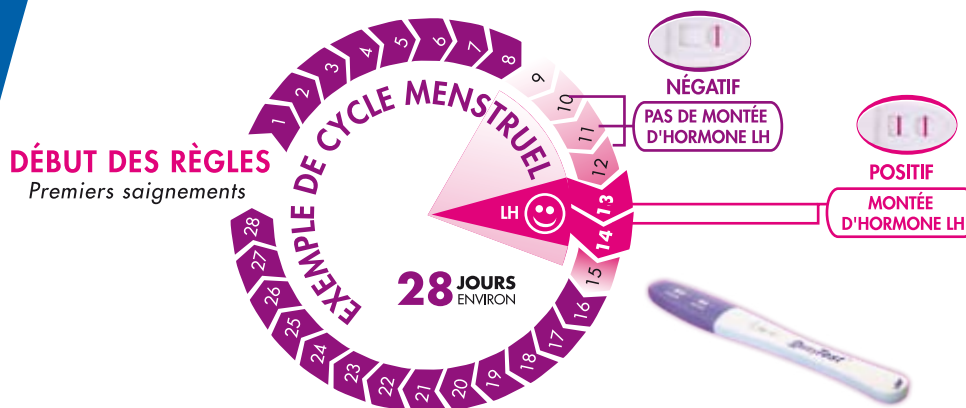

easyTest™

MODELE
LH25V-A7

TEST D'OVULATION

NOUVEAU

VOUS REVELE VOS 2 JOURS LES PLUS FERTILES...

EasyTest est un test d'autodiagnostic à usage in vitro. Il a été spécialement conçu pour une utilisation personnelle à domicile. EasyTest évalue la présence de l'hormone lutéinisante (LH) dans l'urine. La montée du taux d'hormone précède l'ovulation. La fertilité est optimale le jour où le taux de LH est élevé ainsi que le lendemain.

Fiabilité scientifiquement prouvée le EasyTest a une sensibilité de 25UI/L il est donc fiable à plus de 99% et vous indique vos 2 jours les plus fertiles.



Packaging


Poids Brut : 120g
Box Dim. : 195 x 80 x 60mm
EAN 13 : 3760165440635

ACL : 4845237

easyTest™

TEST D'OVULATION

Révèle vos **2 jours** les plus fertiles

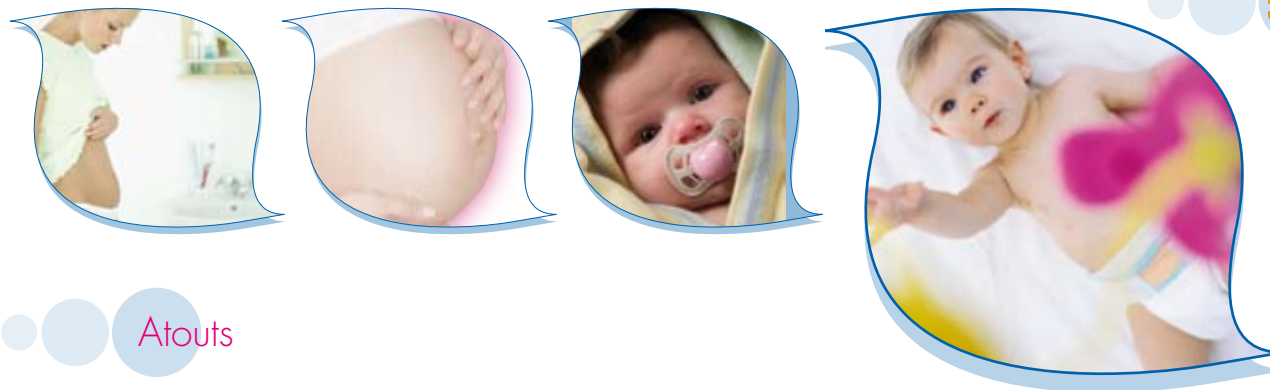

31

Atouts

- Simple d'utilisation
- Fiable à plus de 99%
- Péréption à 30 mois
- Résultat en 5 minutes
- Boîte de 7 tests

FIABLE A PLUS DE 99%



POSITIF

NÉGATIF

UNIQUE

Péréption à 30 mois

easyTest™ vous indique le bon moment pour concevoir votre bébé

- SIMPLE 1** Retirer le capuchon mauve qui recouvre la mèche absorbante. Placer la mèche sous un jet d'urine pendant environ 10 à 15 secondes. (Vous pouvez également recueillir vos urines dans un récipient propre et sec).
- RAPIDE 2** La lecture du résultat se fait **après 5 minutes**, une ligne rose apparaît dans la fenêtre de contrôle, cela signifie que le test a bien fonctionné !
Il ne vous reste plus qu'à lire le résultat.
- FIABLE 3** Fiabilité scientifiquement prouvée. **easyTest** est un test urinaire qui évalue la présence de l'hormone lutéinisante (LH) dans l'urine. La montée du taux d'hormone précède l'ovulation. La fertilité est optimale le jour où le taux de LH est élevé, ainsi que le lendemain.

SANTÉ & BIEN ÊTRE



CE
0483

Boîte de
7 Tests

Made in USA

vm
Visiomed