



BABYDoo
Cleaner®

ModelE
MXOne

NOUVEAU

UN MOUCHE BEBE TRES INNOVANT A CAPSULE HYGIENIQUE JETABLE

Le mouche bébé électronique BABYDoo MX One conçu par le Laboratoire Vi-siomed, est une réelle innovation. Doux, performant, propre et apaisant pour bébé.

Indication :

Jusqu'à un an, la respiration des bébés est exclusivement nasale et ils ne savent pas se moucher ; il est donc indispensable de maintenir une hygiène stricte (de préférence avec un mouche bébé), afin d'éviter toutes infections et autres complications suite à un petit rhume.

Le mouche bébé Babydoo MX One permet d'aspirer les sécrétions nasales, qui encombrant le nez de votre bébé et rendent sa respiration difficile.



Packaging



BABYDoo Cleaner®

UN MOUCHE BEBE TRES INNOVANT A CAPSULE HYGIENIQUE JETABLE



Atouts

- Capsule Hyg niq e jetable
- Aspiration automatique
- 3 embouts silicones hypoallerg niques



100 % PLUS EFFICACE

Fonctions

- Puissance Max. d'aspiration = 50Kpa
- R f rence pour Capsules Jetables Caps MX5 (boite de 100 pcs)



Conseils d'utilisation :

- Il est conseill  d'utiliser le Babydoo dans les cas suivants : nez qui coule, le mouchage, le lavage des fosses nasales, nez encombr .
- Allumez le mouche b b , puis positionnez l'embout silicone dans la narine   traiter.
- Laissez agir le Babydoo environ 5   10 secondes selon l' tat d'encombrement.
- Vous pouvez renouveler autant de fois que n cessaire cette op ration.
- Pour un r sultat plus efficace il est conseill  d'utiliser une solution saline en compl ment du Babydoo MX One pour faciliter l' vacuation des s cr tions (demandez conseil   votre pharmacien).



CE 0482

SANT  & BIEN  TRE

vmm[®]
Visiomed